

FOLLETO INFORMACIÓN AL PACIENTE

Hidrafemme®

Gel hidratante intravaginal

¿Qué es Hidrafemme?

Hidrafemme es un gel no hormonal, compuesto por una asociación sofisticada de polímeros. Es un controlador dinámico de pH para la resequedad vaginal.

¿Quién puede utilizar Hidrafemme?


Hidrafemme puede ser utilizado por mujeres, cuando existe la necesidad de hidratación vaginal.

¿Cómo utilizar Hidrafemme?

Es recomendable que Hidrafemme sea aplicado dos veces por semana. Por ejemplo: utilizar todos los lunes y jueves o martes y viernes. Ésta frecuencia de uso se puede cambiar mediante orientación médica.

¿Cómo aplicar Hidrafemme?

1. Retirar el tubo y un aplicador del paquete. Abrir la tapa del tubo.

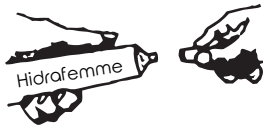

2. Colocar el aplicador en la boquilla del tubo, girándolo, según muestra la figura.



3. Después de colocar el aplicador en posición horizontal, apretar suavemente la base del tubo con los dedos, forzando el gel para que entre en el aplicador, llenándolo hasta el límite.



4. Retirar el aplicador y cerrar el tubo.



5. Acostada boca arriba con las piernas dobladas, introduzca suavemente el aplicador en la vagina, lo más profundamente posible y transferir el contenido del aplicador a ésta. El aplicador ginecológico es desechable, después de su uso debe desecharse.



¿Cómo sé que estoy utilizando la cantidad correcta?

El aplicador desechable de Hidrafemme tiene un limitador y cuando está completamente lleno hasta el límite, proporciona 3 g de gel, que es la cantidad indicada para la aplicación.

¿Hidrafemme puede ser utilizado antes de relaciones sexuales?

Sí. Sin embargo, con el uso de Hidrafemme regularmente, no habrá necesidad de su aplicación antes de las prácticas sexuales, porque la vagina estará hidratada.

¿Hidrafemme puede ser utilizado con otras cremas vaginales?

La utilización de Hidrafemme con otras cremas vaginales debe ser consultada por su médico.

¿Por cuánto tiempo se debe utilizar Hidrafemme?

Hidrafemme puede ser utilizado de forma continua o a criterio médico.

¿Cuáles son las precauciones para utilizar Hidrafemme?

- Utilizar Hidrafemme bajo supervisión médica.
- Hidrafemme está indicado solamente para uso vaginal.
- En caso de haber irritación local, suspender su uso y consultar a su médico.
- No utilizar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en su estuche.
- No utilizar el producto si se viola el estuche.

¿Qué efectos no deseados tiene Hidrafemme?

Hasta la fecha, no hay informes de efectos no deseados con el uso de Hidrafemme.

¿Cómo actúa Hidrafemme?

Hidrafemme es un gel no hormonal compuesto por una asociación sofisticada de polímeros. Es un controlador dinámico de pH para la sequedad vaginal.

Hidrafemme tiene su acción, debido principalmente a tres de sus componentes:

- El policarbofilo es el polímero responsable de la hidratación, debido a su capacidad de agregar moléculas de agua de hasta 60 veces su peso. Después de su aplicación libera lentamente el agua y electrolitos en el epitelio vaginal.
- El éster butílico del copolímero de polimetilviniléter/ácido maleico es ligeramente soluble en los fluidos vaginales y causa que Hidrafemme tenga una alta capacidad de adhesión acuosa vaginal. Proporciona una

mayor retención de los productos básicos y la comodidad de la mujer.

- El lactato de sodio es responsable del mantenimiento del pH vaginal fisiológico, ayudando a evitar la proliferación de hongos y bacterias no deseados.

¿Cuál es la composición de Hidrafemme?

Policarbofila, butil éster de copolímero de polimetilviniléter/ ácido maleico (copolímero PVM/MA), aceite de palma hidrogenado, solución de Lactato de sodio al 50%, carbomer, glicerina, benzoato de sodio, vaselina líquida y agua.

¿Cómo debe ser almacenado Hidrafemme?

Conservar a temperatura ambiente (a no más de 30°C) y proteger de la luz.

Mantener fuera del alcance de niños.

Fabricado por:

Helianto Farmacéutica Ltda.

Av. José Abbas Casseb, 135, Distrito Industrial Ulisses Guimaraes- Sao José do Rio Preto- SP.
Industria Brasileña.

Importado por:

Deutsche Pharma S.A.

Barros Errázuriz 1900, Of. 101-102, Providencia, Santiago, Chile.

Almacenado y distribuido por:

Novofarma Service S.A.,

Av. Víctor Uribe 2280, Quilicura, Santiago, Chile.

DEUTSCHE[®]
P H A R M A ● ● ●